



schülke + seumig

3種類の酵素により、器具類の除菌・洗浄に高い効果を得られます。パウダーですので、経済性に優れ長期間の保存に適しています。

ギガセプト® エンザマティック

特徴

- ・手動による洗浄に安全かつ効果的にご使用できます。
- ・3種類の異なる酵素が、強力な除菌・洗浄効果を発揮します。
- ・微生物に対して広い範囲で効果があります。
- ・防蝕剤を含んでいますので、器具類を傷めません。
- ・アルデヒド・フェノール・塩素は、含んでおりません。
- ・CEマーク取得製品です。

ご使用方法

ギガセプト エンザマティック5gを、ぬるま湯1リットルに溶かしてください。(0.5%溶液)

除菌・洗浄する器具類を15分間浸漬します。その後、水洗いしてください。

作成した溶液は、毎日交換してください。特に汚れがひどい場合は、都度交換してください。

超音波洗浄に適しています。

製品データ

ギガセプト エンザマティック は以下の成分を含みます。

ジアルキルジメチルアンモニウム塩化物 3.6%
イオン界面活性剤、
酵素(プロテアーゼ・リパーゼ・アミラーゼ)、
キレート試薬、賦形剤

化学的物理的データ

濃縮物 外観:	粒状のパウダー
密度:	1g/cm3以下
pH値 (0.5 % 溶液):	10.5

EC 指令による表示

- Xi:** 刺激物
N: 環境に影響
S2: 子供の手の届かない所に保管
S7/8: 使用後は、蓋を密閉し乾燥した場所に保管
S22: 浮遊粒子を吸引しないでください。
S26: 目に入った場合は、直ちに流水ですすぎ、医師に相談してください。
S36/37/39: 適切な保護服や保護メガネを着用してください。
S45/46: 具合が悪くなったり、誤って飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。
S60/61: 内容物を廃棄する場合は、有害廃棄物として処理してください。その際は、自治体などの指定する方法に従ってください。

生物学的効能 浸漬時間

	希釈濃度	浸漬時間
バクテリア	0.5 %	15 分
菌類	0.5 %	15 分
ウイルス (特定ウイルス)	0.5 %	15 分 (5分)

ギガセプト® エンザマティック

ご使用上の注意

器具類の表面にのみご使用ください。
容器は、乾燥した室内で保管してください。
目や皮膚に直接触れないようにしてください。
子供の手の届かないところに保管してください。
有効期限の過ぎた製品は、使用しないでください。

製品コード

	内容量	梱包単位	商品コード
ギガセプト エンザマティック	500 g	6 x 500 g	103 201

環境情報

弊社では、高い品質基準に基づき、経済性に優れ、安全で環境にやさしい製品をご提供します。

ご意見ご質問

本製品に関するご意見、ご質問は、弊社ホームページをご参照いただくか、下記のお客様相談窓口にお問合せください。

<http://www.schuelke.com>

お客様相談窓口
(シュルケ&マイヤー 本社)

TEL: +49 (0) 402152100-666

(日本総代理店)
株式会社アクア・ラボ
TEL:042-548-2878

schuelke@aqualab.co.jp

<http://www.aqualab.co.jp>



EMA
E. R. FTE
UMWELTMANAGEMENT
REG.-Nº. DE-15 - 3



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (**Reg.-No. 004567-MP23**) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (**Reg.-No. DE-150-00003**)

Schülke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0)40-52100 - 0
Fax +49 (0)40-52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com